


HelpIviewer – Manuale utente

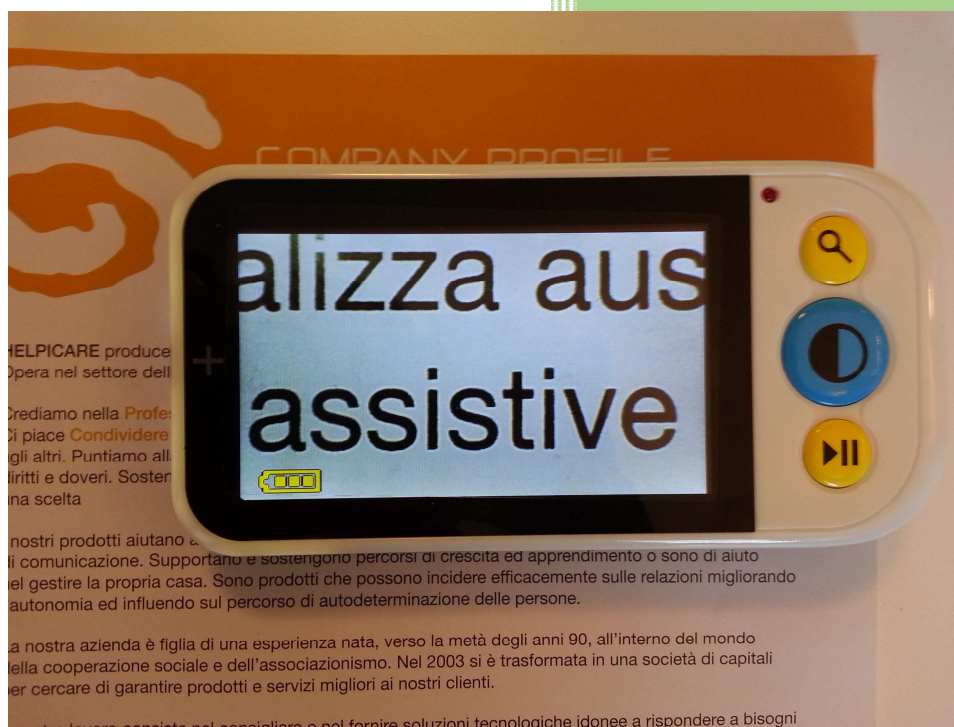

Helpicare by Didacare s.r.l.
Via Santa Clelia Barbieri n. 12
40017 – San Giovanni in Persiceto (BO)
Località Le Budrie
Tel. 051.6810450
Fax 051.6811287
info@helpicare.com
www.helpicare.com

Indice

1.	Panoramica del prodotto	2
2.	Accessori forniti.....	2
3.	Parti e funzioni	2
4.	Caricare il videoingranditore	4
5.	Guida operativa	5
6.	Modalità di visualizzazione.....	5
7.	Regolazione ingrandimento	5
8.	Catturare l'immagine	5
9.	Indicatore di bassa carica.....	5
10.	Spegnere l'unità e modalità risparmio energetico.....	6
11.	Scrivere con il videoingranditore	6
12.	Connettere il videoingranditore ad una TV	6
13.	Connettere al PC	7
14.	Possibili problemi, possibili soluzioni.....	7
15.	Sicurezza e manutenzione	8

Videoingranditore portatile da 4.3"


1. Panoramica del prodotto




Helpviewer è un videoingranditore portatile di 4.3 pollici che aiuta le persone ipovedenti a leggere in maniera chiara i contenuti stampati. Può anche essere collegato alla TV o al computer per una lettura ancora più agevole. Può essere utilizzato nelle scuole, nelle biblioteche e così via.

2. Accessori forniti

1. Videoingranditore Helpviewer
2. Cavo video
3. Cavo USB
4. Batterie al litio
5. Cinturino da polso
6. Adattatore AC/DC
7. Tessuto per pulire e custodia
8. Manuale utente

3. Parti e funzioni

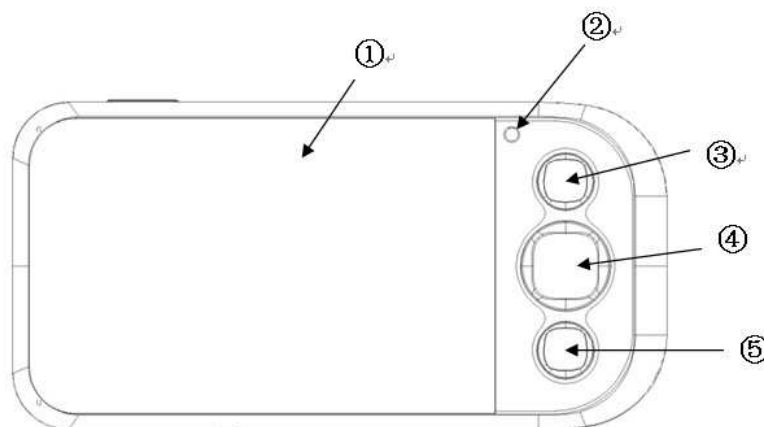

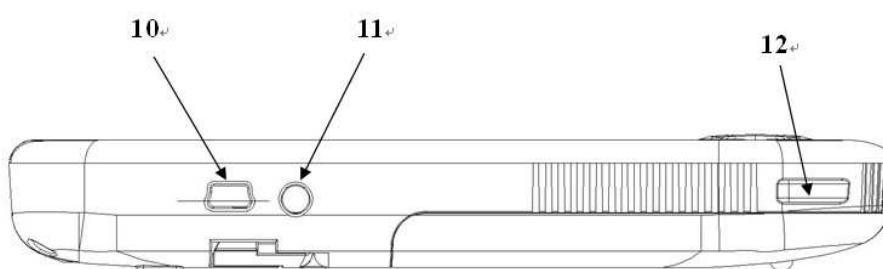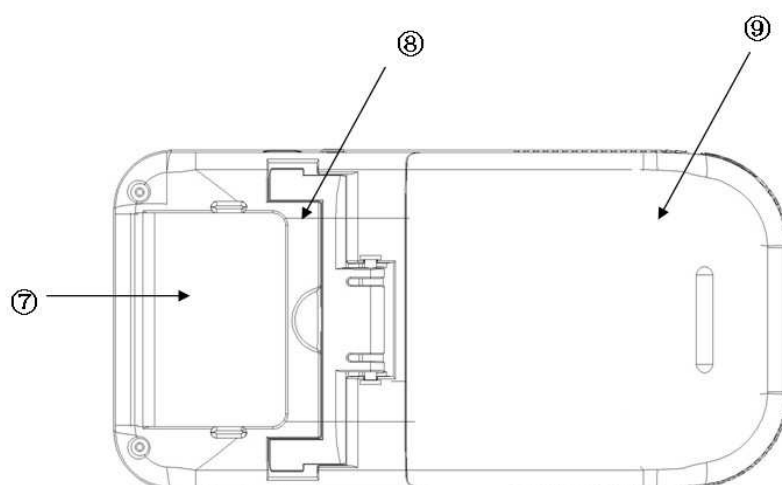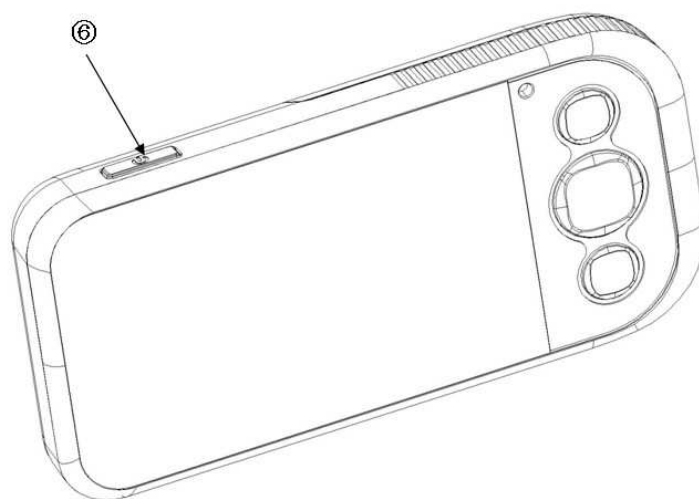


- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Display da 4.3 pollici | 6. On/Off | 11. Uscita AV |
| 2. Indicatore LED | 7. Camera | 12. Jack per il cinturino |
| 3. Ingranditore | 8. Supporto | |
| 4. Modalità contrasto | 9. Vano batterie | |
| 5. Fermo immagine | 10. Connessione adattatore AC/DC | |




4. Caricare il videoingranditore

Prima di usare Helpviewer per la prima volta, dovrete caricare l'unità batterie. Connettere l'adattatore di carica al prodotto e inserirlo nella presa; l'indicatore si illuminerà di rosso indicando che il processo di carica è in corso. Quando la batteria sarà carica, l'indicatore si spegnerà automaticamente.

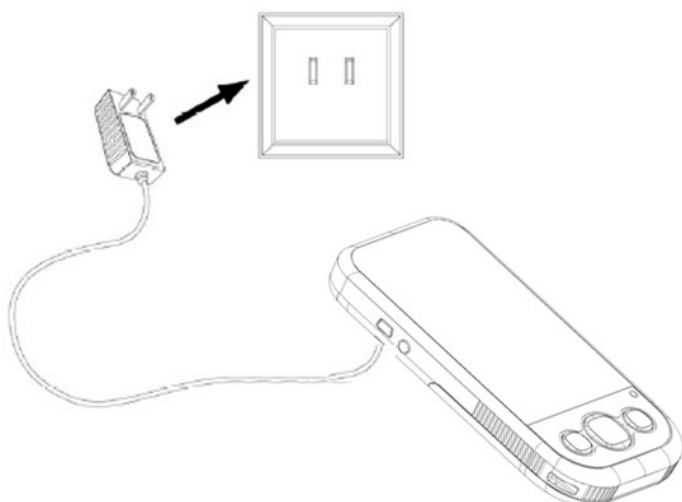
Quando l'indicatore della batteria è vuoto e lampeggia sul display, significa che la batteria è scarica e necessita di ricarica.



5. Guida operativa:


1. Premere il pulsante di accensione per avviare l'unità
2. Posizionare il retro del Videoingranditore contro il testo che si vuole leggere
3. Posizionare il mirino dove si vuole iniziare a leggere. Tutto ciò sotto il mirino viene ingrandito e mostrato sullo schermo.
4. Far scivolare gradualmente l'unità verso destra per leggere fino alla fine della riga. Far scivolare l'unità giù e verso sinistra per leggere la riga successiva.
5. Per cambiare il livello di ingrandimento, premere il pulsante .
6. Per cambiare la visualizzazione del contrasto premere il pulsante  finché non trovate la versione di contrasto più adatta a voi.
7. Per catturare l'immagine corrente, premere il pulsante . Premerlo ancora per sbloccare l'immagine.

6. Modalità di visualizzazione

Premere la modalità di visualizzazione contrasto  per iniziare il ciclo attraverso 12 diverse modalità di visualizzazione contrasto, come segue:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Colori pieni
positivo | 4. Blu su bianco | 7. Nero su giallo | 10. Alto contrasto |
| 2. Bianco e nero | 5. Bianco su blu | 8. Giallo su blu | 11. Bianco su verde |
| 3. Bianco su nero | 6. Giallo su nero | 9. Blu su giallo | 12. Verde su bianco |


7. Regolazione ingrandimento

Premere  per iniziare il ciclo attraverso diversi stadi di ingrandimento da 3x a 32x

8. Catturare l'immagine

Premere il pulsante  per catturare e de-catturare l'immagine corrente

9. Indicatore di bassa carica


Se il livello della batteria è basso, ci sarà questo simbolo  in basso a sinistra dello schermo che vi indicherà di ricaricare la batteria.

10. Spegner l'unità e modalità risparmio energetico

Premere nuovamente il pulsante di accensione per un secondo per spegnere l'unità. Inoltre se l'unità non viene utilizzata per tre minuti, si spegnerà automaticamente.


11. Scrivere con il videoingranditore

Aprire la base dell'unità, poi utilizzare una penna per scrivere sulla destra della camera.

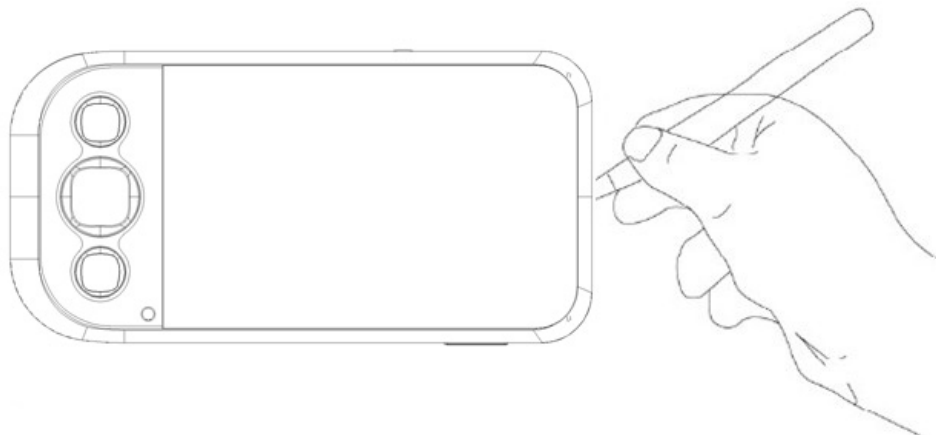




12. Connettere l'ingranditore ad una TV

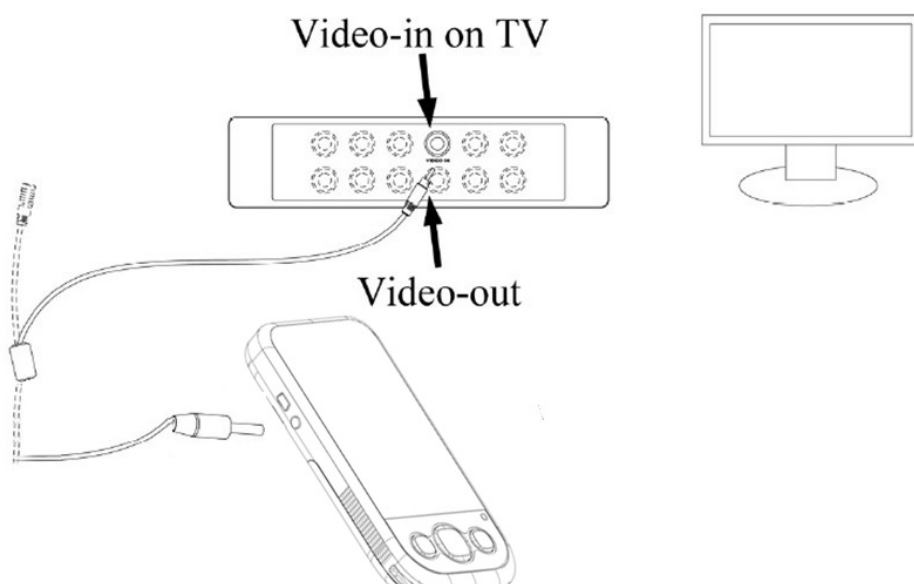Se necessitate di un maggior ingrandimento rispetto al monitor da 4.3 pollici, potete connettere l'ingranditore ad una televisione, utilizzando il cavo video fornito. Per connettere l'ingranditore alla televisione, seguire le seguenti istruzioni



1. Inserire il cavo da 1/8 nell'uscita AV del videoingranditore
2. Inserire l'altra estremità del cavo in un input giallo del Vostro televisore.
3. Fate riferimento al manuale del Vostro televisore per localizzare al meglio le uscite
4. Accendere il televisore. Se necessario, cambiare il canale del vostro televisore sul canale input adatto.
5. Gli oggetti che ingrandirai appariranno sul televisore.

13. Connettere al PC

1. Imposta  Camera Drivers V1.5.1 Camera Drivers dal CD Drive sul tuo computer
2. Copia  Wintec Amcap Wintec Amcap, Vi... Wintec Electroni... sul desktop,
3. Connettendo il Videoingranditore portatile al tuo computer e accendendolo, il Vostro computer riconoscerà automaticamente l'unità.
4. Doppio click "  Wintec Amcap Wintec Amcap, Vi... Wintec Electroni... " per usare il Videoingranditore sullo schermo del computer
5. Disponibile solo la modalità a colori e l'ingrandimento dipende dalle dimensioni dello schermo del computer.

14. Possibili problemi, possibili soluzioni.

Problema	Soluzione
Lo schermo è assente	Assicurarsi che l'unità sia accesa. Caricare le batterie. Verificare che l'oggetto che si vuole ingrandire sia posizionato correttamente sotto il mirino.
L'unità non si accende	Caricare le batterie
L'immagine sullo schermo è nera e/o distorta	Assicurarsi che l'unità sia ben posizionata contro la pagina che si vuole leggere.
L'indicatore LED della batteria non è rosso, anche se il caricabatterie è connesso -o- La batteria non si carica	Assicurarsi di aver inserito bene il cavo. Assicurarsi che la presa funzioni. Se la presa a muro è controllata da un interruttore, assicurarsi che quest'ultimo sia su ON.
Ci sono macchie o imperfezioni sullo schermo	Pulire lo schermo e la camera, posizionata in fondo all'unità.
Il testo è troppo piccolo da leggere	Premere il pulsante di ingrandimento
L'ingranditore è connesso al televisore, ma non appare alcuna immagine ingrandita sullo schermo.	Assicurarsi che il televisore sia acceso. Cambiare sul canale input appropriato del Vostro televisore. Assicurarsi che il cavo video sia saldamente connesso alla porta video dell'ingranditore e connesso nel corretto input del televisore.

15. Sicurezza e manutenzione

Per mantenere il Vostro ingranditore in buone condizioni, osservare i seguenti punti guida:

1. Leggere le istruzioni di questo manuale utente prima di usare l'unità
2. Non cercare di riparare l'ingranditore o aprirne i vani. Questo prodotto non contiene parti utilizzabili.
3. Tenere l'unità lontana da aree bagnate, pioggia, e altri tipi di liquidi. Non immergere l'unità.
4. Utilizzare sempre l'ingranditore in un luogo dove la temperatura è tra 10°C e 40°C.
5. Lasciare sempre l'ingranditore in un luogo dove la temperatura è tra 20°C e 65°C.
6. Non forzare nessun connettore all'interno dell'unità. Tutti i connettori corretti, si inseriscono facilmente.
7. Utilizzare solo il caricabatteria fornito con l'ingranditore. Altri caricabatterie potrebbero danneggiare l'unità.

