

## MANUALE DI UTILIZZO HELPISWITCH 12 WIRELESS



Il sensore Helpiswitch 12 wireless è un sensore senza fili con trasmettitore radio compatibile con i seguenti dispositivi della gamma Simply works:

- Multireceiver
- Helpitalker
- Helpipower
- Minislat
- Maxislat

la Programmazione

la programmazione del sensore necessita per tutti i ricevitori sopraelencati la stessa procedura:

Posizionare il sensore vicino al ricevitore al quale si vuole accoppiare; premere brevemente il pulsante di accoppiamento presente sul ricevitore, il led comincerà a lampeggiare.

Premere entro 10 secondi il tasto di accoppiamento presente nella parte posteriore del sensore, se l'accoppiamento andrà a buon fine il led presente sul ricevitore smetterà di lampeggiare e starà acceso per 5 secondi.

Helpiswitch 12 wireless con Multireceiver, con questa configurazione il sensore attiverà una funzione del PC, la scelta della funzione da attivare su PC è tra questi comandi:

click sinistro, click destro, trascinamento bloccato, spazio, invio, tab, F7, F8, freccia su, freccia giù, freccia sinistra, freccia destra, numero 2, numero 3.

La selezione del comando desiderato avviene attraverso un display presente sul retro del sensore dove si visualizzano i vari comandi associate a dei codici da scegliere con il tasto di programmazione.

È presente sul retro del prodotto un elenco con i codici da selezionare ed i corrispettivi comandi che si attivano su pc.