

MANUALE SIMPLY WORKS FOR IPAD



Compatibilità

Questa interfaccia è compatibile con i seguenti dispositivi:

Ipad1/Ipad2/nuovo Ipad

Ipod touch di terza e quarta generazione

Iphone 3 e 4

Come caricarlo:

connettere il dispositivo al cavo in dotazione, connettere il cavo ad una porta USB, si accenderà la luce verde in corrispondenza dell'icona della batteria presente sul dispositivo, quando sarà carico la luce verde si spegnerà.

Come connetterlo ai dispositivi apple:

Accendere il dispositivo con il tasto a sinistra, la luce comincerà a lampeggiare indicando che sta cercando un dispositivo a cui connettersi.

Dispositivo Apple andare sulle impostazioni di Bluetooth ed attivarlo, l'interfaccia verrà trovata e "nominata" Pretorian-V55.0-ABC1, ora i dispositivi sono connessi.

Come connettere un trasmettitore (Helpiswitch, Didakeyswireless, optimax joystick..) al dispositivo "Simplyworks for I-pad".

Avvicinare il trasmettitore all'interfaccia, premere il tasto "pair" sull'interfaccia, il led comincerà a lampeggiare lentamente.

Ora, entro 10 secondi, premi il tasto "pair" del trasmettitore.

Verifica la connessione attivando il trasmettitore, dovrebbe accendersi il led rosso sul dispositivo Simplyworks for I-pad.

SCHEMA FUNZIONALE CODICI PER UTILIZZO CON SENSORE HELPISWITCH

CODICE	TIPO FUNZ	FUNZIONE	NOTE
0	MULTIMEDIA	AVANTI	
1	MULTIMEDIA	INDIETRO	
2	MULTIMEDIA	TEMPORIZZATO	15 SECONDI
3	MULTIMEDIA	MUTO	
4	SCANSIONE	SELEZIONA	DEVE ESSERE ATTIVATO VOICEOVER
5	SCANSIONE	HOME	DEVE ESSERE ATTIVATO VOICEOVER
6	MULTIMEDIA	PAUSA/PLAY	
7	TASTIERA	SPAZIO	PER APPLICAZIONI ACCESSIBILI PRE
8	TASTIERA	INVIO	PER APPLICAZIONI ACCESSIBILI PRE
9	TASTIERA	TAB	
A	TASTIERA	-1	PER APPLICAZIONI ACCESSIBILI PRE
B	TASTIERA	-3	PER APPLICAZIONI ACCESSIBILI PRE
C	MULTIMEDIA	VOLUME SU	
D	MULTIMEDIA	VOLUME GIU'	
E	TASTIERA	NUMERO 2	
F	TASTIERA	NUMERO 3	
G	TASTIERA	FRECCIA SU	
H	TASTIERA	FRECCIA GIU'	
J	TASTIERA	FRECCIA SINIS	
L	TASTIERA	FRECCIA DESTR	
P	SCANSIONE	SCANSIONE SU	VOICEOVER ATTIVATO/PAG AVA
R	SCANSIONE	SCANSIONE GIU'	VOICEOVER ATTIVATO
T	SCANSIONE	SCANS SINISTR	VOICEOVER ATTIVATO

U SCANSIONE SCANS DESTRA VOICEOVER ATTIVATO

USARE LA MODALITA' A SCANSIONE

Per utilizzare questa modalità occorre per prima cosa attivare nelle impostazioni del dispositivo Apple il "Voiceover" che si trova nel menù "accessibilità".

Una volta attivata questa modalità si potranno usare i codici relativi alla scansione e l'icona selezionata sarà identificata da una "cornice".

Se si vuole togliere il lettore su ogni icone occorre tenere premuto per alcuni secondi il tasto verde a destra del dispositivo Simplyworks.

Per una navigazione efficace si consigliano 5 sensori (4 direzioni, 1 selezione) o l'utilizzo del joystick Optimax.

ATTENZIONE: per visualizzare la tastiera virtuale sul tablet occorre premere velocemente il tasto verde a destra dell'interfaccia.

Prodotto distribuito in Italia da:

HELPI CARE by DIDACARE srl

Via S.Clelia Barbieri, 12

Località Le Budrie

40017 S.Giovanni in Persiceto Bologna

Tel +39 051.6810450

Fax +39 051.6811287