

N-ABLER JOYSTICK

GUIDA ALL'UTILIZZO

Questo "mouse" è caratterizzato da una particolare attenzione all'accesso al PC da parte di chi avendo problemi motori non riesce a controllare con efficacia il mouse convenzionale.

Estremamente resistente alle sollecitazioni prevede la possibilità di essere collegato al PC attraverso la porta USB o PS2 senza bisogno di alcun driver.



Installazione

Con il PC spento connettete lo strumento al Computer attraverso la porta desiderata USB o PS2 mouse, accendete il PC, lo strumento verrà automaticamente riconosciuto dal sistema operativo e potrete subito cominciare ad utilizzarlo, essendo un mouse a tutti gli effetti potrete regolarne i parametri attraverso il pannello di controllo del sistema operativo.

Movimento del Puntatore

Il movimento del puntatore sullo schermo si avrà in maniera proporzionale al movimento applicato sulla leva dello strumento, il puntatore continuerà a muoversi finchè la leva non verrà riportata nella posizione iniziale.

Sono presenti come accessori anche due tipologie diverse di "impugnature" che sono una palla di spugna molto tenera e una "maniglia" per utilizzarle dovete semplicemente sfilare la manopola presente sulla leva e sostituirla.

I pulsanti presenti sulla superficie dello strumento sono incavati rispetto al piano di appoggio della mano al fine di facilitare la digitazione e sono di colore diverso per agevolare la discriminazione degli stessi; rappresentano le seguenti funzioni:

Pulsante di colore verde in basso a sinistra:	Doppio Click
Pulsante di colore nero in basso a destra:	Trascinamento bloccato
Pulsante di colore giallo in alto a destra	Click destro/ Click sinistro
Pulsante di colore rosso in alto a sinistra	Click sinistro/ Click destro
Pulsante in alto centrale di colore nero	Blocco degli assi

Interruttore nella parte frontale dello strumento: permettere di scegliere fra 4 differenti velocità del puntatore.


Led in alto a sinistra

Questo led normalmente di colore verde diventa rosso quando si attiva il tasto del trascinamento bloccato.

Entrate per sensori

Nella parte frontale dello strumento sono presenti due ingressi per sensori che permettono di utilizzare due sensori per le funzioni di Click sinistro e click destro del mouse

Questo strumento può essere facilmente utilizzato orientandolo diversamente per agevolare in alcuni casi l'utilizzo.

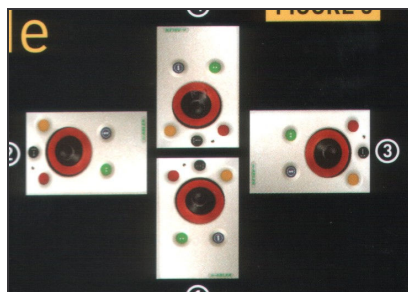

Di deve per prima cosa tenere premuto per alcuni secondi (3-4) il pulsante che solitamente occorre per regolare la velocità del puntatore si sentirà un segnale acustico, a questo punto si deve muovere la leva nella direzione alto a prescindere da come sarà posizionato lo strumento.

In questo modo N-abler avrà "imparato" la nuova direzione di utilizzo.

A questo punto si può decidere di disabilitare il feedback acustico sul doppio click cliccando il tasto rosso oppure di confermarlo cliccando quello giallo.

Per terminare la procedura occorre confermare il pulsante che fungerà da click sinistro che potrà essere o il giallo o il rosso.

A questo punto lo strumento è nuovamente pronto per essere utilizzato.

Distribuito in Esclusiva in Italia da :
Helpicare by Didacare srl
Via Crevalcore 1/6
40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)

Tel 051.6810450