

Helpimini Manuale d'uso



Contenuto Confezione:

Tastiera ridotta Helpimini

La tastiera ridotta helpimini è una tastiera con attivazione "a membrana", priva di tasti fisici, oltre ad essere una tastiera può essere utilizzata come emulatore di mouse.



La pressione del tasto raffigurato permette la scelta tra la funziona tastiera e la funzione mouse.

Per capire in quale modalità ci si trova occorre osservare quale dei due led è acceso nei simboli sottostanti.



Le due modalità non possono essere attivate contemporaneamente

Gestione emulazione del mouse

Una volta scelta come funzione l'emulazione del mouse la parte in basso a destra del dispositivo raffigurata nell'immagine sottostante è attiva come emulazione del mouse



Sono disponibili tutte le funzioni del mouse, il trascinamento bocciato, attivabile selezionando il tasto sottostante, prevede l'accensione di un led verde per evidenziarne l'attivazione



Tasti speciali in modalità tastiera

È disponibile il tasto "AltF4" che all'attivazione chiude l'ultima "finestra di task" aperta nel sistema operativo.



Caratteristiche tecniche

Connesione: USB
Dimensioni totali: 20*15 cm
Dimensioni Testi: 10*10 mm
Spazio fra i tasti: 3 mm
Peso: 500 grammi
Certificazioni: CE

Prodotto e Distribuito in Italia da

Helpicare by Didacare srl
Via Santa Clelia Barbieri 12 Località Le Budrie
40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna)
Tel 0516810450
Fax 0516811287

Email per Assistenza

assistenza@helpicare.com

Sito

www.helpicare.com

Numero Verde

